

GUIDA RAPIDA ALLA CONFIGURAZIONE

AUTOLOG IQ™
SISTEMA PER AUTOTRASFUSIONE



Medtronic
Further, Together

Prima di utilizzare il sistema, leggere interamente il Manuale utente del sistema per autotrasfusione autoLog IQ™ di Medtronic.

Questa Guida di configurazione rapida non sostituisce il Manuale utente completo.

Il suo scopo è solo quello di fornire indicazioni all'operatore nel corso della configurazione del sistema per autotrasfusione autoLog IQ.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEL SANGUE



1.

Collegare il connettore alla parte inferiore del reservoir di raccolta.
Assicurarsi che il connettore sia ben fissato.



2.

Chiudere il clamp sul connettore prima che l'installazione del kit sia completa.
Assicurarsi che il clamp sia completamente chiuso.



3.1

Collocare il reservoir nell'apposito supporto.
Collegare una linea del vuoto alla porta con tappo giallo sul reservoir.



3.2

Collegare l'altra estremità della linea del vuoto al bacino di raccolta troppo pieno del dispositivo.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEL SANGUE



4.

Attaccare il connettore della linea di aspirazione/anticoagulante con tappo blu alla porta di ingresso con tappo blu o bianco sulla parte superiore del reservoir.

5.

Chiudere il morsetto sulla linea di aspirazione/anticoagulante.

6.

Accendere il dispositivo premendo



7.

Attivare il vuoto premendo



CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEL SANGUE



8.

Se necessario, regolare l'impostazione del vuoto usando il menu Vacuum (Vuoto) nella schermata Main (Principale).



9.

Forare il contenitore di anticoagulante. Se il contenitore non ha sfato, aprire il coperchio dello sfato sulla camera di gocciolamento.



10.1

Prima di raccogliere il sangue, aprire il morsetto e riempire il serbatoio di raccolta con almeno 100 ml di soluzione anticoagulante.



10.2

Ridurre il flusso di anticoagulante a un rapporto di circa 15 ml di soluzione ogni 100 ml di sangue.

CONFIGURAZIONE DEL KIT DI LAVAGGIO



1.

Viene visualizzato il messaggio:
Kit non installato.
Bloccare il coperchio della campana.



2.

Appendere la soluzione salina di lavaggio al gancio inferiore del braccio del supporto e rimuovere il coperchio dell'asta per flebo.



3.

Collocare il kit di lavaggio nel braccio del supporto e rimuovere il coperchio del kit di lavaggio.



4.

Rimuovere il sacchetto dei rifiuti dal kit di lavaggio. Assicurarsi che la valvola di scarico sia chiusa.

CONFIGURAZIONE DEL KIT DI LAVAGGIO



5.

Posizionare la sacca di scarto negli appositi perni.



6.

Rimuovere la sacca di recupero dal kit di lavaggio e appenderla al gancio superiore dell'asta per flebo. Chiudere i morsetti sulle 2 linee di scarico con tappo rosso che includono ciascuna una porta a membrana.



7.

Posizionare la campana nella camera della centrifuga con il tubo di scarico con tappo giallo rivolto verso la sacca di scarto. Fare riferimento alle indicazioni sul pannello superiore.



8.

Allineare i contrassegni della centrifuga con le alette sulla campana. Per bloccare la campana, premere contemporaneamente verso il basso sulla vaschetta e ruotarla in senso orario fino a quando non si sente un clic.

CONFIGURAZIONE DEL KIT DI LAVAGGIO



9.

Inserire il connettore con tappo giallo nella porta di ingresso con tappo giallo della sacca di scarto. Confermare che non ci sia kinking nella linea di scarico.

10.

Viene visualizzato il messaggio:
Inserire il kit nella valvola e nella pompa. Premere [play icon] per riprendere)


11.1

Collocare il collettore nella cavità predisposta. Posizionare le 3 linee dei tubi del collettore nelle guide e assicurarsi che ogni tubo sia completamente inserito in ciascuna guida.

11.2

Posizionare la linea singola del collettore nel rilevatore di aria. Chiudere il coperchio del collettore. Ruotare il dispositivo di chiusura del coperchio del collettore finché gli indicatori di blocco non sono allineati.

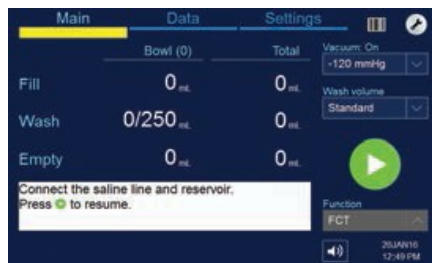

CONFIGURAZIONE DEL KIT DI LAVAGGIO



12.

Tirare la leva della pompa e tenerla aperta. Allungare il tubo della pompa attorno alla testa e sopra la guida del tubo di scarico della pompa. Rilasciare la leva della pompa.

13.

Premere  Viene visualizzato il messaggio: **Collegare la linea della soluzione salina e il reservoir.** Premere  per riprendere.

14.

Forare il tubo del collettore centrale nella sacca o nelle sacche di soluzione salina. **Nota:** se si utilizza una sacca di soluzione salina, verificare che il morsetto sulla linea di soluzione salina inutilizzata sia chiuso.



15.

Collegare il tubo sinistro del collettore al connettore con tappo blu nella parte inferiore del serbatoio, quindi aprire il morsetto sul connettore.



CONFIGURAZIONE DEL TRATTAMENTO DEL SANGUE




1.

Premere . Viene visualizzato il messaggio: **Macchina ferma.**
Premere  per abilitare l'avvio automatico.

2.1

Premere  per attivare la modalità di avvio automatico. Viene visualizzato il messaggio: **Avvio automatico abilitato.**
Premere  per avviare manualmente

2.2

Il dispositivo si avvia automaticamente quando rileva circa 800 ml di sangue nel reservoir per almeno 5 secondi.
Nota: per iniziare il riempimento prima che siano stati raccolti 800 ml, premere 

GRAZIE!

Medtronic
Further, Together

Medtronic

Europa

Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel. +41 (0)21 802 70 00
Fax +41 (0)21 802 79 00

Italia

Medtronic Italia S.p.A.
Via Varesina, 162
IT- 20156 Milano (Mi)
www.medtronic.it
Tel. +39 02 24 13 71
Fax +39 02 24 13 81

Svizzera

Medtronic (Schweiz) AG
Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053 Münchenbuchsee
www.medtronic.ch
Tel. +41 (0)31 868 01 00
Fax +41 (0)31 868 01 99

UC201708091IT © Medtronic 2018 .
Tutti i diritti riservati.